


TECHNISCHES DATENBLATT

20050 | 20075 | 20100 | 20150 | 20200 | 20250

Material: PP / Papier, blau

Größen: siehe unten

Verpackungseinheit: siehe unten

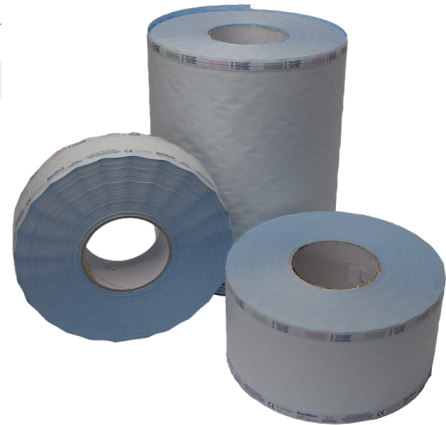

ARTIKEL	BREITE	LÄNGE	VERPACKUNGSEINHEIT
20050	50 mm	200 m	8 Stück
20075	75 mm	200 m	8 Stück
20100	100 mm	200 m	4 Stück
20150	150 mm	200 m	4 Stück
20200	200 mm	200 m	2 Stück
20250	250 mm	200 m	2 Stück

Beschreibung

Sterilisationsfolie mit Dampf- und EO-Gasindikator, für FO-Sterilisation geeignet, Rollenlänge 200 m

Hinweise zur Siegelung

Siegeltemperatur: 160° C / 180° C

Zeit zwischen den Riegeln der Maschine und dem Produkt: 0,9 Sekunden / 1,5 Sekunden

Druck: 1 -3 bar

Empfohlene Temperatur: 160° C und 180° C

Sterilisationsverfahren

Dampfsterilisation: 121° C = 15 Minuten (Minimum) / 134° C = 5 Minuten (Minimum)

EtO Gas: 50 - 60° C = 3-6 Stunden

Hersteller

VERISTERIL | STERIFIT S.R.L. | Via dei Martinitt 3 | 20146 Milano (MI) | Italy

Kreissparkasse Köln

IBAN: DE49 3705 0299 0127 2721 64
BIC: COKSDE33XXX

Sparkasse Köln/Bonn

IBAN: DE32 3705 0198 1933 3245 90
BIC: COLSDE33XXX

HypoVereinsbank

IBAN: DE63 3702 0090 0027 7497 39
BIC: HYVEDEMM429

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (zu finden unter www.nitras.de oder auf Anfrage). Our general terms and conditions of business and delivery apply (can be found at www.nitras.de or on request).